

## Technical Data Sheet/ 技术信息文件

<b>产品类别</b>	手部防护	 <p>医用丁腈 检查手套 100只/盒</p>
<b>产品名称</b>	医用丁腈检查手套	
<b>防护等级</b>	/	
<b>产品型号</b>	HD-GP6005	
<b>产品认证</b>	符合国家 GB 10213-2006/GB 15979	
<b>包装规格</b>	100 只/盒；10 盒/箱	
<b>有效期</b>	自生产日期起 5 年	
<b>应用领域</b>	适用于医疗检查和护理行业,起到隔离与防护的作用	

### 产品特性

【产品性能、主要成分】用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检的用品。该产品采用丁腈胶乳制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。

### 使用及维护说明

#### 【医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释】



避免日晒



保持干燥



未灭菌



切勿再次使用



#### 【禁忌性、注意事项、警示及提示性说明】

1. 有过敏体质的人如出现皮疹或异常感觉，应立即停止使用。
2. 在每次穿用前要检查手套是否有裂纹、小孔或撕裂的痕迹。
3. 避免接触如强酸、强碱、有机溶剂等可能会导致手套性能衰退或损坏的化学药物。

#### 【使用说明】

1. 本产品不分左右手，请选择适合本人手型规格的手套。穿戴手套时，请勿戴戒指或其他饰品，注意修剪指甲。
2. 打开包装，取出本品，皮肤贴手套内表面穿戴并检查表面是否完好。
3. 本品限一次性使用，使用后产品请按医疗垃圾处理，防止病菌对环境的污染。

【储存、运输条件、方法】存放在相对湿度≤80%、无阳光直射、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

### 使用方法

- 1、从包装中取出一只手套，检查是否存在针孔或撕裂破口；
- 2、如手套为左右手通用型，穿戴时可不区分左右手。  
反之请在穿戴前将手套的拇指和其他手指正确对齐；
- 3、将五指插入袖口，然后将袖口拉起至腕部；
- 4、检查手指和手掌部位是否严密贴合。袖口应紧贴腕部。



穿戴示意图

### 订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-GP6005	汉盾 HD-GP6005 医用丁腈检查手套 100 只/盒；10 盒/箱 (4.0G)	100 只/盒；10 盒/箱	盒

