

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	手部防护	<div><div>医用PVC 检查手套</div><div>100只/盒</div><div></div></div>
产品名称	医用 PVC 检查手套	
防护等级	/	
产品型号	HD-GP6006	
产品认证	符合国家 GB 24786-2009/ GB 15979-2002	
包装规格	100 只/盒；10 盒/箱	
有效期	自生产日期起 5 年	
应用领域	适用于医疗检查和护理行业, 起到隔离与防护的作用	

产品特性

【产品性能、主要成分】用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检的用品。该产品采用聚氯乙烯制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供, 一次性使用。

使用及维护说明

【医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释】



避免日晒



保持干燥



未灭菌



切勿再次使用



【禁忌性、注意事项、警示及提示性说明】

1. 有过敏体质的人如出现皮疹或异常感觉, 应立即停止使用。
2. 在每次穿用前要检查手套是否有裂纹、小孔或撕裂的痕迹。
3. 避免接触如强酸、强碱、有机溶剂等可能会导致手套性能衰退或损坏的化学药物。

【使用说明】

1. 本产品不分左右手, 请选择适合本人手型规格的手套。穿戴手套时, 请勿戴戒指或其他饰品, 注意修剪指甲。
2. 打开包装, 取出本品, 皮肤贴手套内表面穿戴并检查表面是否完好。
3. 本品限一次性使用, 使用后产品请按医疗垃圾处理, 防止病菌对环境的污染。

【储存、运输条件、方法】存放在相对湿度 $\leq 80\%$ 、无阳光直射、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

使用方法

- 1、从包装中取出一只手套，检查是否存在针孔或撕裂破口；
- 2、如手套为左右手通用型，穿戴时可不区分左右手。
反之请在穿戴前将手套的拇指和其他手指正确对齐；
- 3、将五指插入袖口，然后将袖口拉起至腕部；
- 4、检查手指和手掌部位是否严密贴合。袖口应紧贴腕部。



穿戴示意图

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-GP6006	汉盾 HD-GP6006 医用 PVC 检查手套 100 只/盒；10 盒/箱（5.0G）	100 只/盒；10 盒/箱	盒