

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	呼吸防护
产品名称	三层蓝色一次性医用口罩无菌型（灭菌型）17.5cm*9.5cm*16cm
防护等级	YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》
产品型号	灭菌型 17.5*9.5cm
产品认证	YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》
材质	由口罩体、鼻夹、口罩带组成
包装规格	10片/包，5包/盒，40盒/箱 1片/包，50包/盒，40盒/箱
有效期	自生产日期起 3 年
防护对象	供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴



1. 产品描述



警告



怕雨



怕晒



如包装破损切勿使用

应急产品
无菌型

不得二次使用

STERILE EO

经环氧乙烷灭菌

STERILE

无菌

2. 适用场所

供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

3. 材料组成

由口罩体、鼻夹、口罩带组成。其中口罩体由内外层纺粘无纺布、中间层熔喷无纺布构成，共 3 层。

4. 产品特性

1. 口罩上配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；
2. 鼻夹长度不小于 8.0cm；
3. 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力不小于 10N；
4. 口罩的细菌过滤效率不小于 95%；
5. 口罩两侧面进行气体交换的通气阻力不大于 49Pa/c m²；
6. 产品无菌，环氧乙烷残留量不超过 10 μg/g。

5. 使用说明

1. 打开包装，取出口罩，握住口罩两头，鼻梁条朝上；
2. 口罩遮住口鼻下颌，耳带套在耳后；
3. 调整鼻梁条，将其与鼻梁贴合；
4. 适当调整口罩位置，使得佩戴舒；
5. 按正反面标识正确佩戴，手部请勿接触口罩内侧。

6. 警告

1. 使用前请仔细阅读使用说明，避免手部接触口罩内层；
2. 本品经环氧乙烷灭菌，使用前请检验包装情况，若包装破损应禁止使用；
3. 本品属一次性使用，不得重复使用；
4. 佩戴中如发生液体喷溅、口罩破损、受潮及感觉呼吸阻力明显增大时，请及时更换；

口罩系列

5. 产品使用后，应按医院或环保部门要求进行处理。

7. 禁忌症

暂未发现

8. 使用范围与储存：

1. 使用前请仔细阅读使用说明，避免手部接触口罩内层；
2. 本品经环氧乙烷灭菌，使用前请检验包装情况，若包装破损应禁止使用；
3. 本品属一次性使用，不得重复使用；
4. 佩戴中如发生液体喷溅、口罩破损、受潮及感觉呼吸阻力明显增大时，请及时更换；
5. 产品使用后，应按医院或环保部门要求进行处理。

本品应存储在阴凉、干燥、无腐蚀性气体、通风良好、清洁的环境中。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
无菌型（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16cm	汉盾 三层蓝色一次性医用口罩无菌型（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16cm（耳带绳）（10片/包，5包/盒，40盒/箱）	10片/包，5包/盒，40盒/箱	盒
Z 灭菌型 17.5*9.5*16.5cm	汉盾 三层蓝色一次性医用口罩无菌型 Z（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16.5cm（耳带绳）（复合膜包装；1片/包，50包/盒，40盒/箱）	1片/包，50包/盒，40盒/箱	盒
Z 灭菌型 17.5*9.5*16.5cm	汉盾 三层蓝色一次性医用口罩无菌型 Z（灭菌型） 17.5cm*9.5cm*16.5cm（耳带绳）（纸塑袋包装；1片/包，50包/盒，40盒/箱）	1片/包，50包/盒，40盒/箱	盒